

Résumé spécifique sur l'emballage des spécimens de Covid-19

Luce Valois, Assistante chef en gestion des risques et de la
qualité

Juillet 2020

Spécimen Covid-19

- * Lors du prélèvement, l'extérieur de l'écouvillon doit avoir été **désinfecté**
- * Il faut **préalablement** avoir reçu la formation sur l'emballage et le transport des spécimens et avoir en sa possession la carte de certification valide (valide 3 ans)
- * Le spécimen de Covid-19 est de la **catégorie B**
- * Fournir un emballage réglementaire : **triple emballage** (voir les diapositives suivantes)
- * Expédier **le plus rapidement possible** (le spécimen peut se conserver 16 heures au réfrigérateur)
- * Le spécimen de Covid-19 doit être transporté **sur glace (2°C à 8°C)**

Triple emballage

1. Récipient primaire étanche et désinfecté



2. Emballage secondaire étanche

Déposer **1 seul spécimen** par sac fermé avec un **absorbant**



Emballage (suite)

3. Sac de plastique avec glace bien fermé

Déposer les spécimens Covid-19 dans un grand sac de plastique contenant de la glace (vous pouvez mettre plusieurs spécimens dans ce sac)



4. Emballage tertiaire rigide avec thermorégulateur (Ice pack)



A ne PAS faire




NE PAS FAIRE
Il ne faut pas déposer le spécimen
directement sur la glace

A faire

Faire

Il faut déposer le spécimen dans un sac de plastique et déposer ce sac de plastique dans un autre sac de plastique où vous pouvez mettre plusieurs spécimens de Covid-19 de patients différents

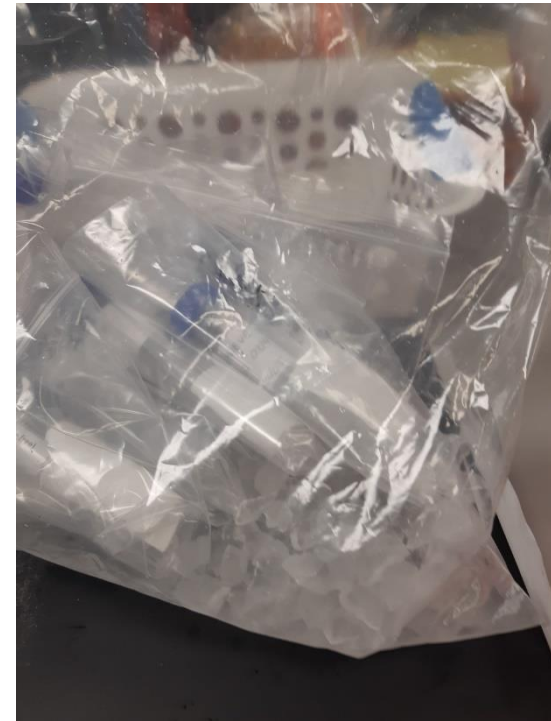

Identification de la boîte de transport

- * Bien étiqueter la boîte de transport :
 - * **Nom de l'organisme et adresse de l'organisme expéditeur** (vous)
 - * **Nom de l'organisme et adresse du destinataire** (Cité de la Santé)
- * Étiquettes de danger : UN3373 Catégorie B



Substances Biologiques Catégorie B
N° 24 HRES Canutec 613-996-6666
Cellulaire *666

Remerciements

Je tiens à remercier

- * Dr Olivier Haeck, microbiologiste-infectiologue au CISSS de Laval
- * Mme Émilie Gosselin, agente administrative à la réception des laboratoires pour sa collaboration
- * Mme Annie G Lavoie, agente administrative à la réception des laboratoires pour sa collaboration

Avez-vous des questions

